

Щиколотка с мультиосной функциональностью, предназначенная для безопасной ходьбы

# Щиколотка Multiflex

Описание и шифр щиколотки

Описание и шифр амортизатора

Максимальный вес пользователя/  
уровень двиг. активности

379342 Щиколотка Multiflex **W** диаметр 30 мм  
379343 Щиколотка Multiflex **O**, диаметр 30 мм  
379344 Щиколотка Multiflex **B**, диаметр 30 мм

409007 - амортизатор **W** 60°  
409008 - амортизатор **O** 70°  
409009 - амортизатор **B** 80°


125 кг/1-3  
125 кг/1-3  
125 кг/1-3



409353 Пирамидка Multiflex **W**  
409354 Пирамидка Multiflex **O**  
409355 Пирамидка Multiflex **B**

409007 - амортизатор **W** 60°  
409008 - амортизатор **O** 70°  
409009 - амортизатор **B** 80°

125 кг/1-3  
125 кг/1-3  
125 кг/1-3

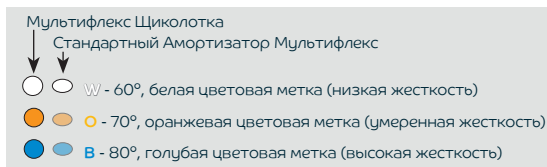


Сборочные размеры	Материал	Вес	Подбор щиколотки и амортизатора
60 мм	Алюминиевый сплав	201 г	<p>Щиколотка Амортизатор</p> <p>60кг 80кг 100кг 125кг</p>
58 мм	Алюминиевый сплав и нержавеющая сталь	199 г	<p>Амортизатор для стандартной щиколотки</p>

# Сборочная схема адаптеров и щиколоток Multiflex

## Адаптер под вычленение щиколотки (для стопы Seattle Lightfoot)


399101

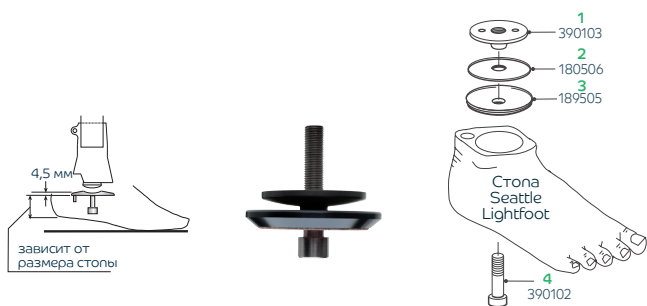

Поз.	Шифр	Описание	Кол-во
1	390103	Гильзовая пластина	1 шт.
2	180506	Фрикционный диск	1 шт.
3	189505	Юстировочная чаша	1 шт.
4	390102	Болт крепления стопы 3/8" UNF x 2,0	1 шт.

## Стандартный амортизатор для щиколоток Multiflex


- 409007 60°, белая цветовая метка
- 409008 70°, оранжевая цветовая метка
- 409009 80°, голубая цветовая метка

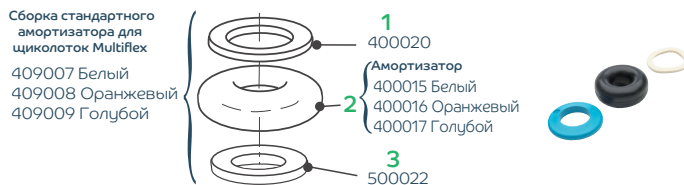

### Сборка стандартного амортизатора для щиколоток Мультифлекс:

Поз.	Шифр	Описание	Кол-во
1	400020	Защитная шайба	1 шт.
2	409015	Стандартный амортизатор 60°, белая цветовая метка	1 шт.
	409016	Стандартный амортизатор, 70°, оранжевая цветовая метка	1 шт.
	409017	Стандартный амортизатор, 80°, голубая цветовая метка	1 шт.
3	500022	Опорное кольцо	1 шт.


## Стыковочный адаптер для щиколотки Мультифлекс 409012 (для стопы Seattle Lightfoot)

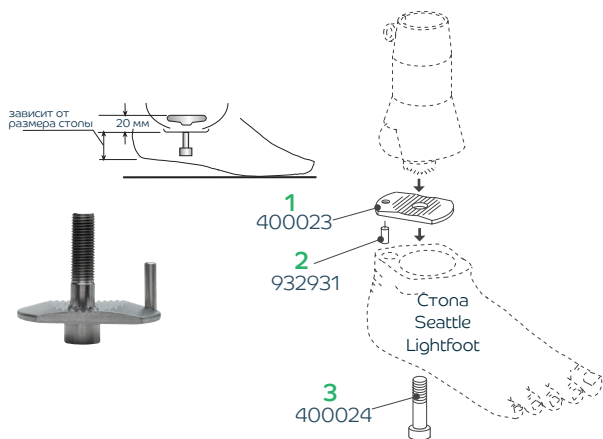

Поз.	Шифр	Описание	Кол-во
1	400023	Адаптерная пластина	1 шт.
2	932931	Штифт для предотвращения прокручивания	1 шт.
3	400024	Соединительный болт стопы 3/8" UNF x 1,6"	1 шт.

## Щиколотка Multiflex (с пирамидкой)

- 60° (белая метка) 409353
- 70° (оранжевая метка) 409354
- 80° (голубая метка) 409355

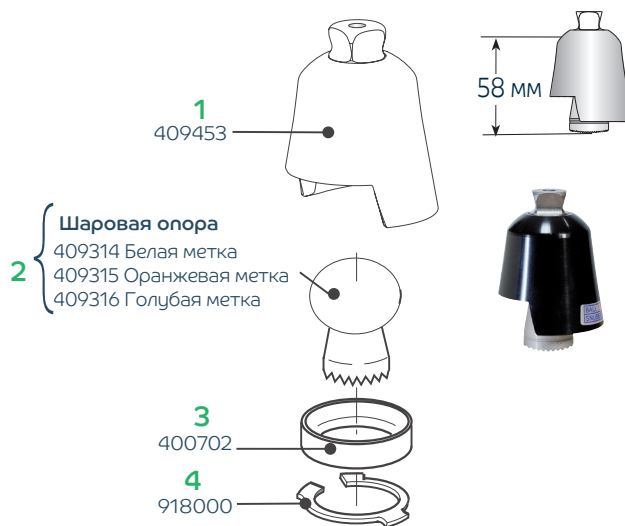


Поз.	Шифр	Описание	Кол-во
1	409453	Корпус Мультифлекс щиколотки с пирамидкой	1 шт.
2	409314	Шаровая опора	1 шт.
	409315	Шаровая опора, 60°, белая цветовая метка	1 шт.
	409316	Шаровая опора, 70°, оранжевая цветовая метка	1 шт.
3	400702	Нижний корпус щиколотки	1 шт.
4	918000	Запорное кольцо	1 шт.

## Щиколотка Multiflex, диаметр 30 мм

- 60° (белая метка) 379342
- 70° (оранжевая метка) 379343
- 80° (голубая метка) 379344

Стандартные щиколотка и амортизатор

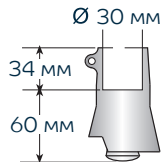

Поз.	Шифр	Описание	Кол-во
1	916151	Гроверная шайба, М6	1 шт.
2	910410	Винт с шестигранным шлицем, М6х20 мм	1 шт.
3	374202	Корпус стандартной щиколотки, 30 мм	1 шт.
4	409314	Шаровая опора, 60°, белая цветовая метка	1 шт.
	409315	Шаровая опора, 70°, оранжевая цветовая метка	1 шт.
	409316	Шаровая опора, 80°, голубая цветовая метка	1 шт.
5	400702	Нижний корпус щиколотки	1 шт.
6	918000	Запорное кольцо	1 шт.

Щиколотка с адаптером-пирамидкой и стандартный амортизатор



Мультифлекс Щиколотка

Стандартный Амортизатор Мультифлекс

- W - 60°, белая цветовая метка (низкая жесткость)
- O - 70°, оранжевая цветовая метка (умеренная жесткость)
- B - 80°, голубая цветовая метка (высокая жесткость)

Шифры комплектующих приведены только для справки и облегчения сборки изделия и не могут быть заказаны отдельно!