



Blade^{XT}

Руководство для пользователя

BXTAG1SF-BXTAG9SF
BXTAG1SM-BXTAG9SM

Blatchford:

Пожалуйста сохраните данную инструкцию

Стопа BladeXT была специально разработана для занятий основными видами спорта и бега.

Ступени лестницы

Пользователь должен быть предупрежден, что из-за глубокого «С»-образного профиля стопы BladeXT, при спуске по лестнице существует потенциальная опасность «перешагивания».



При обращении со стопой всегда помните об опасности защемления пальцев кисти руки!



Ключевые моменты и меры предосторожности

Пользователь всегда должен помнить о риске поскользнуться при нахождении на влажных/гладких поверхностях.

Чрезмерный износ спортивной подошвы может привести к потере ее крепления на стопе.

Чрезмерный износ или повреждение пружинных элементов могут привести к отказу изделия.

Протез не должен более использоваться, если спортивная подошва сильно изношена, порвана или свободно болтается на стопе.

Перед любым использованием стопы пользователь обязан внимательно осмотреть стопу BladeXT, в особенности пружины пятки и мыска стопы, на предмет возможных повреждений.

Пользователь обязан незамедлительно сообщить своему протезисту/лечащему врачу о любых произошедших с протезом изменениях.

Изменения могут включать в себя следующее:

- Снижение возврата энергии;
- Посторонние шумы;
- Ощутимое смягчение мыска стопы и/или пятки.

Пользователь также обязан незамедлительно сообщить своему протезисту/лечащему врачу о любых изменениях в массе тела и/или уровне двигательной активности.

Сборку и ремонт стопы BladeXT имеют право производить только сертифицированные специалисты, прошедшие обучение в учебных центрах Blatchford.

Изделие является водозащищенным, при этом допускается погружение его в воду на глубину максимум до 1 метра.

Избегайте контакта с абразивной окружающей средой, как например, песок и пыль, для предотвращения разрушения и повреждения частей стопы рекомендуется после воздействия абразивной среды тщательно промыть изделие под струей проточной пресной воды.

При попадании изделия в морскую или хлорированную воду рекомендуется промыть его под струей проточной пресной воды.

Изделие может использоваться только в температурном диапазоне от -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Очистка:

Для очистки внешней поверхности изделия используйте влажную не ворсистую ткань и детское мыло, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие средства. Перед использованием тщательно просушите изделие.

Зарегистрированный адрес производителя

Blatchford Products Limited, Lister Road,
Basingstoke RG22 4AH, UK.

blatchford.co.uk/дистрибьюторы

UK

Blatchford Products Ltd.
Unit D Antura
Kingsland Business Park
Basingstoke
RG24 8PZ
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 1256 316600
Fax: +44 (0) 1256 316710
Email: customer.service@blatchford.co.uk
www.blatchford.co.uk

US & Canada

Blatchford Inc.
1031 Byers Road
Miamisburg
Ohio 45342
USA
Tel: +1 (0) 800 548 3534
Fax: +1 (0) 800 929 3636
Email: info@blatchfordus.com
www.blatchfordus.com

Germany

Blatchford Europe GmbH,
Fritz-Hornschuch-Str. 9 (3.OG)
D-95326 Kulmbach
GERMANY
Tel: +49 (0) 9221/87808-0
Fax: +49 (0) 9221/87808-60
Email: info@blatchford.de
www.blatchford.de

France

Blatchford SAS
Parcd'Activitésdel'Aéroport125
Impasse
Jean-Baptiste Say
34470 PEROLS
FRANCE
Tel: +33 (0) 467 820 820
Fax: +33 (0) 467 073 630
Email: contact@blatchford.fr
www.blatchford.fr

India

Endolite India Ltd
A4 Naraina Industrial Area
Phase - 1
New Delhi
INDIA – 110028
Tel: +91 (011) 45689955
Fax: +91 (011) 25891543
Email: endolite@vsnl.com
www.endoliteindia.com

Norway

Ortopro AS
Hardangervegen 72
Seksjon 17
5224 Nesttun
NORWAY
Tel: +47 (0) 55 91 88 60
Email: post@ortopro.no
www.ortopro.no