

Косметическое покрытие

Инструкция для протезиста

539087, 539096

Blatchford:

1 Описание и назначение

Область применения:

Данные инструкции предназначены только для протезиста. Косметическое покрытие предназначается для использования со стопами Elite Blade, Javelin и EchelonVT.

При установке в соответствии со следующими инструкциями косметическое покрытие обеспечивает защиту от попадания загрязнителей и пыли в косметическую калошу стопы.

Если вода или какая-либо другая жидкость попадет в стопу, может потребоваться отгибание косметической калоши, после чего следует перевернуть стопу, слить жидкость из стопы и дать ей высохнуть.

Покрытие предназначается исключительно для индивидуального использования.


2 Техническое обслуживание

Очистка от загрязнений:

Для очистки внешней поверхности устройства используйте влажную неворсистую салфетку и детское нейтральное мыло, ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать активные чистящие вещества.

3 Спецификация

Шифр изделия	539087 Elite Blade Javelin	539096 EchelonVT
Материал	Неопрен	Неопрен
Вес изделия (перед обрезкой)	47г (1.5унц.)	36г (1.25унц.)
Температура эксплуатации и хранения	от -15 °C до +50 °C (от 5 °F до 122 °F)	

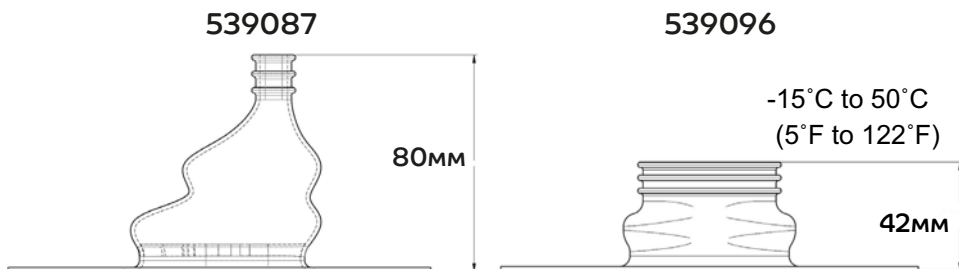

Сборочные размеры

4 Сборочные инструкции

Применяются в случае, если покрытие должно приклеиваться в косметической калоше стопы.

- 1** Зашкурьте на шарошке верхнюю поверхность косметической калоши



- 2** Установите покрытие на косметическую калошу и нанесите клей Loctite 424 (926104) на область между нижней стороной покрытия и верхней поверхностью стопы.



- 3** Плотно сожмите вместе обе поверхности и удерживайте до полного высыхания клея, после обрежьте излишки материала, по краям верхней поверхности стопы.



- 4** Отшлифуйте края заподлицо со стопой.



Зарегистрированный адрес производителя

Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke RG22 4AH, UK.

Blatchford является зарегистрированным товарным знаком холдинга Blatchford Products Limited.

blatchford.co.uk/distributors

UK

Blatchford Products Ltd.
Unit D Antura
Kingsland Business Park
Basingstoke
RG24 8PZ
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 1256 316600
Fax: +44 (0) 1256 316710
Email: customer.service@blatchford.co.uk
www.blatchford.co.uk

US & Canada

Blatchford Inc.
1031 Byers Road
Miamisburg
Ohio 45342
USA
Tel: +1 (0) 800 548 3534
Fax: +1 (0) 800 929 3636
Email: info@blatchfordus.com
www.blatchfordus.com

Germany

Blatchford Europe GmbH,
Fritz-Hornschuch-Str. 9 (3.OG)
D-95326 Kulmbach
GERMANY
Tel: +49 (0) 9221/87808-0
Fax: +49 (0) 9221/87808-60
Email: info@blatchford.de
www.blatchford.de

France

Blatchford SAS
Parc d'Activités de l'Aéroport
125 Impasse
Jean-Baptiste Say
34470 PEROLS
FRANCE
Tel: +33 (0) 467 820 820
Fax: +33 (0) 467 073 630
Email: contact@blatchford.fr
www.blatchford.fr

India

Endolite India Ltd
A4 Naraina Industrial Area
Phase - 1
New Delhi
INDIA – 110028
Tel: +91 (011) 45689955
Fax: +91 (011) 25891543
Email: endolite@vsnl.com
www.endoliteindia.com

Norway

Ortopro AS
Hardangervegen 72
Seksjon 17
5224 Nesttun
NORWAY
Tel: +47 (0) 55 91 88 60
Email: post@ortopro.no
www.ortopro.no